

Инструкция по применению

Паста с алмазным наполнителем для предварительной полировки композитов и керамики

«ПолирПаст-D-предварительная»

по ТУ 9391-030-49908538-2008

РУ № ФСР 2009/04043 от 21.01.2009

Показания

Полировальная паста для предварительной шлифовки и полировки поверхности пломб из композитных материалов светового и химического отверждения и керамики.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

Состав

Полиэтиленгликоль-400
Полиэтиленгликоль-1500
Абразивный порошок АСМ (фракция 10/14)
Вода дистиллированная

Свойства

Принцип действия «ПолирПаст-D-предварительная» основан на специфических абразивных свойствах мелкодисперсного алмазного порошка.

Благодаря этим свойствам алмазный абразив производит шлифовку и предварительную полировку сформированной пломбы из композитных материалов.

Способ применения

Перед началом процедур следует подсушить обрабатываемую поверхность. Нанести на полировальную головку или щетку необходимое количество «ПолирПаст-D-предварительная». Обработку вести 1-3 мин. на средней скорости, не превышая 8-10 тыс. об/мин. и не оказывая чрезмерного давления на обрабатываемую поверхность. После окончания полировки смыть остатки пасты водой.

Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.

Побочные воздействия

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

Форма выпуска и комплектация

Паста (шприц) 3 мл – 2 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.
Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Условия транспортировки

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

Утилизация

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

Сведения о производителе медицинского изделия

ООО «НКФ Омега-Дент»
Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212
Тел.: +7 (800) 500-51-92
Тел./факс: +7 (495) 679-80-53
E-mail: info@omegadent.ru
www.omegadent.ru