

**Инструкция по применению****Компресс гемостатический и антисептический для альвеол****«Альвостаз-губка» №3**

по ТУ 9391-054-49908538-2016

РУ № РЗН 2017/5603 от 11.04.2017

Компресс гемостатический и антисептический для альвеол по «Альвостаз-губка» №3 применяется в профессиональной стоматологии в лечебно-профилактических учреждениях.

**Показания**

- для профилактики воспалительных осложнений после хирургических вмешательств в полости рта;
- альвеолярные компрессы после удаления зубов;
- лечение альвеолита и пародонтального абсцесса;
- заполнение пародонтального кармана после местной противовоспалительной терапии или кюретажа для антисептической обработки.

**Состав**

Основа:

гемостатическая губка (сухой коллаген - 98 %, фурацилин – 0,75 %, борная кислота – 1,25 %)

Пропитка:

1,3 бутандиол – 89,965 %  
хлорамфеникол – 5,0 %  
неомицина сульфат – 5,0 %  
хлоргексидин – 0,025 %  
дексаметазон – 0,01 %

**Основные технические характеристики и свойства**

«Альвостаз-губка» №3 - специальное средство для применения в хирургической стоматологии и пародонтологии, представляет собой губки размером 1,0×1,0×1,0 см (±0,3 см) светло-желтого цвета без запаха. Масса одной губки 0,1г (±0,03г). Удельный вес гемостатической пропитки - не менее 36 %.

Введенный в альвеолу «Альвостаз-губка» №3 впитывает выделяемый раной экссудат, тем самым помогая заживить рану, являющуюся следствием удаления зуба. Губка обладает локальными антисептическими свойствами за счет антибактериальных компонентов, введенных в состав губки, необходимых для обеспечения должной асептики раны. Препарат оказывает свое действие в течение нескольких часов, затем постепенно отторгается из лунки. Материал в самое короткое время способствует безболезненному заживлению. Не обладая локальной токсичностью, «Альвостаз-губка» №3 не вызывает образования язв на слизистой оболочке.

**Способ применения**

После удаления зуба или корня необходимо провести туалет лунки. С целью удаления грануляционной или инфицированной омертвевшей ткани, оторвавшейся от корня околокорневой гранулемы и костных фрагментов, лунка должна быть промыта подогретым физиологическим раствором. Отсосать промывную жидкость из лунки с помощью пипетки и изолировать лунку. Изъять один кубик губки «Альвостаз-губка» № 3 из баночки пинцетом и аккуратно поместить его в лунку. Поверх губки можно наложить сухой тампон.

**Побочные действия**

При правильном хранении, транспортировании и использовании согласно данной инструкции, побочные действия отсутствуют.

**Противопоказания**

Реакция индивидуальной чувствительности к компонентам.

**Упаковка и хранение**

Материал расфасован в баночку, содержащую 30 губок размером 1,0×1,0×1,0 см (±0,3 см), пропитанных соответствующим составом.

Комплект поставки:

Компресс гемостатический и антисептический для альвеол  
«Альвостаз-губка» №3 во флаконе, закрытом полиэтиленовой крышкой,  
с этикеткой..... 1 шт.  
Картонная коробка..... 1 шт.  
Инструкция по применению..... 1 шт.

Хранить в закрытых, сухих помещениях с естественной вентиляцией при температуре от + 4°C до + 24°C. Не допускается хранение вблизи источников тепла и попадание прямых солнечных лучей.

Срок годности – 3 года.

**Условия транспортировки**

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

**Утилизация**

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

Использованный материал содержит потенциальную опасность и утилизируются как отходы класса Б, согласно СанПиН 2.1.7.2790.

**Сведения о производителе медицинского изделия**

ООО «НКФ Омега-Дент»  
Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212  
Тел.: +7 (800) 500-51-92  
Тел./факс: +7 (495) 679-80-53  
E-mail: info@omegadent.ru  
www.omegadent.ru