

#### Показания

Для профилактики и лечения альвеолитов.

#### Противопоказания.

«Альвостаз-жгутики» противопоказан больным с повышенной чувствительностью к препаратам йода. Не использовать не по назначению.

#### Состав и свойства

Абсорбиционный жгутик  
Трикальций фосфат  
Эвгенол  
Масло оливковое  
Йодоформ

«Альвостаз-жгутики» представляет собой специальное средство для профилактики и лечения альвеолита. Помещенный в альвеолу «Альвостаз-жгутики» быстро снимает воспаление и боль. Материал оказывает свое действие в течение нескольких часов, затем постепенно выводится наружу. Обладая слабой локальной токсичностью, не вызывает воспаления слизистой оболочки полости рта. При использовании материала как профилактического средства препараты пропитки в самое короткое время способствуют безболезненному заживлению лунки.

#### Способ применения

После удаления зуба необходимо провести туалет лунки. Небольшое количество жгутика аккуратно поместить в лунку. Поверх «Альвостаза» можно наложить сухой марлевый тампон. Пациента следует предупредить, что с течением времени постепенно тампон оторвется из лунки.

Только для местного применения.

*Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.*

#### Побочные воздействия

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

#### Форма выпуска и комплектация

Жгутик (баночка) 1 см × 1 м – 1 шт.;  
Инструкция по применению – 1 шт.

#### Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.  
Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

#### Условия транспортировки

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

#### Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

#### Утилизация

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

#### Сведения о производителе медицинского изделия

ООО «НКФ Омега-Дент»  
Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212  
Тел.: +7 (800) 500-51-92  
Тел./факс: +7 (495) 679-80-53  
E-mail: info@omegadent.ru  
www.omegadent.ru