

### *Инструкция по применению*

Паста с алмазным наполнителем для окончательной полировки композитов и керамики

**«ПолирПаст-Д-финиш»**

по ТУ 9391-030-49908538-2008

РУ № ФСР 2009/04044 от 21.01.2009

#### **Показания**

Полировальная паста для окончательной (финишной) полировки поверхности пломб из композитных материалов светового и химического отверждения и керамики.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

#### **Состав**

Полиэтиленгликоль-400  
Полиэтиленгликоль-1500  
Абразивный порошок АСМ (фракция 5/3)  
Вода дистиллированная

#### **Свойства**

Принцип действия «ПолирПаст-Д-финиш» основан на специфических абразивных свойствах мелкодисперсного алмазного порошка.

Благодаря этим свойствам алмазный абразив производит окончательную полировку сформированной пломбы из композитных материалов.

#### **Способ применения**

Перед началом процедур следует подсушить обрабатываемую поверхность. Нанести на полировальную головку или щетку необходимое количество «ПолирПаст-Д-финиш». Обработку вести 1-3 мин. на средней скорости, не превышая 8-10 тыс. об/мин. и не оказывая чрезмерного давления на обрабатываемую поверхность. Полировку производить до придания пломбе желаемого блеска. После окончания полировки смыть остатки пасты водой.

*Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.*

#### **Побочные воздействия**

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

#### **Форма выпуска и комплектация**

Паста (шприц) 3 мл – 2 шт.;  
Инструкция по применению – 1 шт.

#### **Условия хранения**

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.  
Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

#### **Условия транспортировки**

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

#### **Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

#### **Утилизация**

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

#### **Сведения о производителе медицинского изделия**

ООО «НКФ Омега-Дент»  
Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212  
Тел.: +7 (800) 500-51-92  
Тел./факс: +7 (495) 679-80-53  
E-mail: info@omegadent.ru  
www.omegadent.ru