

Материал – жидкость противокариесная профилактическая  
**«Фторлак прозрачный»**  
по ТУ 9391-031-49908538-2008  
РУ № ФСР 2008/03812 от 15.12.2008

**Показания**

- после снятия зубных отложений при профессиональной гигиенической чистке зубов;
- *на терапевтическом приеме:* при кариесе в стадии пятна, клиновидных дефектах, при лечении гиперстезии, после полировки эмали;
- *на ортопедическом приеме:* для защиты живой культи отпрепарированного зуба, при обработке контактных поверхностей соседних зубов, при фиксации кламерных конструкций;
- *на пародонтологическом приеме:* после кюретажа пародонтальных карманов для защиты шеек зубов, прицervикальной гиперстезии;
- *лечение и профилактика кариеса у детей:* сохранение молочных зубов, при пигмен-тированных глубоких фиссурах постоянных зубов, в стадии созревания фиссур, при незрелых фиссурах.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

**Состав**

Пентилацетат  
Коллодий  
Аминофлюорид

**Свойства**

«Фторлак прозрачный» представляет собой бесцветную суспензию. Активным компонентом является аминофлюорид, процентное соотношение которого сбалансировано для достижения максимального противокариесного эффекта. Аминофлюорид (соединение фтора нового поколения) обладает повышенной активностью.

**Способ применения**

Зубы предварительно изолировать от слюны. Высушить изолированные зубы воздухом из пюстера. На высушенную поверхность зубов нанести тонким слоем «Фторлак» с помощью обычных аппликаторов типа «микробраш». Через 10-15 сек. «Фторлак» высохнет самостоятельно. При необходимости его можно подсушить сжатым воздухом. Можно нанести второй слой лака и подсушить воздухом для скорейшего высыхания. Пациента следует предупредить о том, что не следует принимать твердую пищу в течение 2-х часов и не проводить чистку зубов в течение 12 часов после проведения процедуры. Для поддержания противокариозного эффекта повторное покрытие необходимо проводить через 3-6 месяцев.

В процессе применения следует плотно укупоривать флакон, чтобы избежать испарения растворителя и последующего подсыхания и загустения лака.

Возможно выпадение осадка, не влияющего на физико-химические свойства материала. *Перед употреблением взболтать!*

*Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.*

**Побочные воздействия**

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

**Форма выпуска и комплектация**

Жидкость (стеклянный флакон) 13 мл – 1 шт.;  
Инструкция по применению – 1 шт.

**Условия хранения**

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.  
Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

**Условия транспортировки**

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

**Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

**Утилизация**

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

**Сведения о производителе медицинского изделия**

ООО «НКФ Омега-Дент»  
Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212  
Тел.: +7 (800) 500-51-92  
Тел./факс: +7 (495) 679-80-53  
E-mail: info@omegadent.ru  
www.omegadent.ru