

Инструкция по применению

Паста с алмазным наполнителем для окончательной полировки до состояния сухого блеска композитов и керамики

«ПолирПаст-Д-сухой блеск»

по ТУ 9391-030-49908538-2008

РУ № ФСР 2009/04045 от 21.01.2009

Показания

Паста для окончательной полировки до состояния сухого блеска поверхности пломб из композитных материалов светового и химического отверждения и керамики.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

Состав

Полиэтиленгликоль-400
Полиэтиленгликоль-1500
Абразивный порошок АСМ (фракция 1/0,5)
Вода дистиллированная

Свойства

Принцип действия «ПолирПаст-Д-сухой блеск» основан на специфических абразивных свойствах мелкодисперсного алмазного порошка.

Благодаря этим свойствам алмазный абразив производит окончательную полировку до состояния сухого блеска сформированной пломбы из композитных материалов.

Способ применения

Перед началом процедур следует подсушить обрабатываемую поверхность. Нанести на полировальную головку или щетку необходимое количество «ПолирПаст-Д-сухой блеск». Обработку вести 1-3 мин. на средней скорости, не превышая 8-10 тыс. об/мин. и не оказывая чрезмерного давления на обрабатываемую поверхность. Полировку производить до придания пломбе желаемого блеска. После окончания полировки смыть остатки пасты водой.

Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.

Побочные воздействия

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

Форма выпуска и комплектация

Паста (шприц) 3 мл – 2 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.
Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Условия транспортировки

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

Утилизация

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

Сведения о производителе медицинского изделия

ООО «НКФ Омега-Дент»
Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212
Тел.: +7 (800) 500-51-92
Тел./факс: +7 (495) 679-80-53
E-mail: info@omegadent.ru
www.omegadent.ru