

Инструкция по применению

Паста для удаления камней и окончательной полировки пломб

«ПолирПаст – Z»

по ТУ 9391-022-49908538-2008

РУ № ФСР 2009/04040 от 21.01.2009

Показания

- полировка поверхности корня после удаления зубного камня механическим способом;
- окончательная полировка пломб из композиционных материалов химического и светового отверждения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

Состав

Корунд F600
Каолин
Оксид цинка
Неосвит
Силикон

Свойства

Принцип действия «ПолирПаст-Z» основан на специфических полирующих свойствах мелкодисперсного абразива, используемого в «ПолирПаст-Z». Благодаря этим свойствам «ПолирПаст-Z» снимает мелкий зубной камень и полирует ткани зуба, не повреждая их. Кроме того, при окончательной полировке композитных пломб «ПолирПаст-Z» придает им блеск.

Способ применения

Перед началом процедур следует подсушить обрабатываемую поверхность. Нанести на полировальную головку необходимое количество «ПолирПаст-Z». При снятии зубных камней обработку вести на средней скорости и небольшом давлении на обрабатываемую поверхность. При обработке пломб скорость можно довести до 8-10 тыс. об/мин. Полировку производить до придания пломбе желаемого блеска. После окончания полировки смыть остатки пасты водой.

Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.

Побочные воздействия

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

Форма выпуска и комплектация

Паста (пластиковая банка) 40 г – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.
Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.
Защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

Утилизация

Утилизация материала должна проводиться согласно общим правилам организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

Сведения о производителе медицинского изделия

ООО «НКФ Омега-Дент»
Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212
Тел.: +7 (800) 500-51-92
Тел./факс: +7 (495) 679-80-53
E-mail: info@omegadent.ru
www.omegadent.ru