

### *Инструкция по применению*

Средство для снижения чувствительности дентина

«Сенсистаб»

по ТУ 9391-018-49908538-2005

РУ № ФСР 2010/08046 от 22.06.2010

#### **Показания**

- повышенная чувствительность дентина в пришеечной области;
- перед постановкой временных коронок;
- после профилактической чистки зубов;
- в процессе и после отбеливания зубов;
- пародонтальная хирургия.

#### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

#### **Состав**

Калия оксалат  
Азотная кислота  
Вода дистиллированная  
Бутилбензоат

#### **Свойства**

Средство «Сенсистаб» нетоксично, не обесцвечивает зубы, легко наносится и биологически совместим с мягкими тканями.

«Сенсистаб» позволяет загерметизировать дентинные канальцы и снять дентинную чувствительность за один прием. Ни очистки поверхности зуба, ни промывания не требуется.

Средство «Сенсистаб» вступает в реакцию с гидроксипатитом зуба, образуя маленькие гранулы кальция, которые осаждаются в течение нескольких секунд внутри дентинных канальцев и на поверхности живого дентина.

Осажденные кислотоустойчивые кристаллы образуют биологический и химический комплекс с основой живого дентина.

#### **Способ применения**

Вскрыть препарат, отделить защитный колпачок от шприца. Надеть на шприц канюлю и нанести средство «Сенсистаб» на обрабатываемый участок зуба. Средство можно наносить как на сухую, так и на влажную поверхность. После нанесения выдержать 30-40 сек., затем удалить «Сенсистаб» с обработанной поверхности. После обработки может наблюдаться бело-матовый налет из кристаллов кальция.

#### **Побочные воздействия**

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

#### **Форма выпуска и комплектация**

Средство (шприц) 2,5 мл – 2 шт.;  
Сменные канюли – 20 шт.;  
Инструкция по применению – 1 шт.

#### **Условия хранения**

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.  
Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

#### **Условия транспортировки**

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

#### **Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

#### **Утилизация**

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

#### **Сведения о производителе медицинского изделия**

ООО «НКФ Омега-Дент»  
Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212  
Тел.: +7 (800) 500-51-92  
Тел./факс: +7 (495) 679-80-53  
E-mail: info@omegadent.ru  
www.omegadent.ru