

*Инструкция по применению*

**Паста для лечения пульпитов и периодонтитов**

**«Йодекс»**

по ТУ 9391-028-49908538-2007

РУ № ФСР 2007/00886 от 30.10.2012

**Состав**

Йодоформ  
Камфора  
Оксид цинка  
Масло оливковое  
Барий сернокислый

**Показания и свойства**

«Йодекс» применяется как профилактическое и лечебное средство при лечении пульпитов, острых или хронических периодонтитов. Паста «Йодекс» обладает дезинфицирующим и бактерицидным свойствами, повышает защитные силы периапикальных тканей, не препятствует развитию зубного зачатка. Препарат рентгеноконтрастен, в канале паста не затвердевает.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

**Способ применения**

После эндодонтической подготовки проводится пломбирование канала зуба до апекса пастой «Йодекс» на 2-3 недели. После получения положительного клинического результата (с рентгенологическим контролем) проводится удаление временного пломбировочного материала, промывание канала антисептиком и заполнение его постоянным пломбировочным материалом.

**К сведению.**

«Йодекс» имеет тенденцию затвердевать на поверхности, когда баночка остается открытой длительное время. Рекомендуется: закрывать баночку после каждого применения; при необходимости перемешать пасту перед применением каким-либо сухим инструментом; в случае затвердения препарат можно размягчить любым жирным маслом (персиковое и т.п.). Как все материалы на камфорной и ментоловой основе, эту пасту следует применять с осторожностью при лечении детей младше 7 лет.

*Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.*

**Побочные воздействия**

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

**Форма выпуска и комплектация**

Паста (стеклянная баночка) 15 г – 1 шт.;  
Инструкция по применению – 1 шт.

**Условия хранения**

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.  
Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

**Условия транспортировки**

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

**Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

**Утилизация**

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

**Сведения о производителе медицинского изделия**

ООО «НКФ Омега-Дент»  
Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212  
Тел.: +7 (800) 500-51-92  
Тел./факс: +7 (495) 679-80-53  
E-mail: info@omegadent.ru  
www.omegadent.ru